

## MANUAL PARA EL USUARIO

### BOLSA PARA LA RECOGIDA DE ORINA PARA CAMA

JOLFAMAR es una marca registrada de JOLFAMAR XXI, S.L

© ALL RIGHTS RESERVED JOLFAMAR® / JOLFAMAR.COM



FABRICADO POR JOLFAMAR XXI, S.L.  
CARRER ANDORRA - 28 C  
08830 SANT BOI / BARCELONA - ESPAÑA

#### AVISO:


La reutilización de un producto desechable de un solo uso puede causar lesiones al usuario.

Este producto contiene FTALATOS.

#### NO UTILICE EL PRODUCTO SI EL ENVOLTORIO ESTA DAÑADO O PRESENTA ALGÚN DEFECTO.

#### INSTRUCCIONES DE USO

##### COLOCACIÓN Y USO DE LA BOLSA

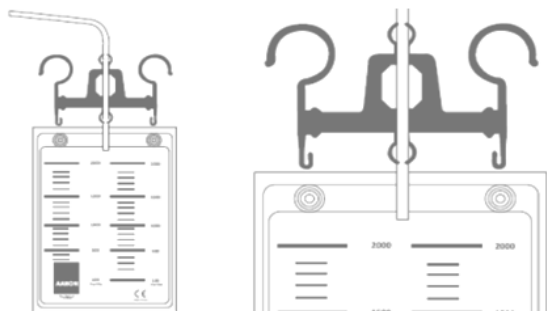

1-. Extraiga la bolsa de orina de la caja y revise el estado de conectores, válvulas, tubos y estado físico del producto. Si ve alguna anomalía evite usar esa unidad y sustitúyala por otra. Acople el conector del extremo del tubo a la sonda o al colector del pene.

2-. Coloque la percha de sujeción en un lateral de la cama para fijar posteriormente la bolsa. Asegúrese de sujetar bien la percha a la cama para evitar cualquier rotura fortuita de la bolsa, percha o cama.

3-. Revise que la válvula de vaciado se encuentra cerrada.

4-. Para un correcto uso de la bolsa. Se recomienda vaciarla de vez en cuando evitando que el nivel de orina sobrepase la capacidad.

#### IMPORTANTE:

NO REUTILICE LA BOLSA DE ORINA. ESTO PODRÍA OCASIONAR LESIONES AL USUARIO.

PARA ASEGURAR QUE EL LLENADO DE LA BOLSA DE ORINA SE EFECTUA CORRECTAMENTE. RECOMENDAMOS FROTAR SUAVEMENTE LA PARTE SUPERIOR DE LA BOLSA CON LOS DEDOS.

#### APERTURA Y CIERRE DE VÁLVULAS:



Para un correcto funcionamiento de la bolsa asegúrese de revisar el estado de la válvula de salida.

La válvula de vaciado axial se encuentra abierta cuando esta hacia abajo y, se encuentra cerrada cuando esta hacia arriba. Para cerrar la válvula asegúrese de presionarla hasta oír un clic.

La válvula de vaciado en "T" o "CRUZ" se encuentra abierta cuando esta hacia la derecha y cerrada cuando esta hacia la izquierda. (Según ilustración de arriba)

#### INDICACIONES:

- Bolsa para la recogida de orina.
- PRODUCTO NO ESTERILIZADO.
- DE UN SOLO USO.

#### CARACTERÍSTICAS:

Fabricado con cloruro de polivinilo.

Tubo de drenaje siliconado de alta resistencia al acodamiento.

Escala aprox. de 2l, 4l y 5l según modelo.

Este no es un producto con función de medición.

Con válvula de seguridad de vaciado y válvula anti retorno según modelo.

Este producto contiene FTALATOS

#### ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN:

